

BLOW In Excellent



ALCOHOL TESTER
Instrukce obsluhy

Před vykonáním testu

Vypláchněte ústa vodou nebo tekutinou, která neobsahuje alkohol. Nekuřte ani nepijte nic alkoholického po dobu alespoň 20 min před vykonáním testu. Pozůstatky alkoholu v ústech můžou značně zvětšit výsledek měření, stejný efekt můžou mít také ochucené nebo ovocné džusy, sladkosti, sirupy na bázi alkoholu, nebo vyplachování úst tekutinami obsahující alkohol.

Z hygienických důvodů je nutné používat jednorázové náustky.

Upozornění: 20 min před vykonáním testu by se nemělo jíst, pít, kouřit. Nepřízpůsobením těmto podmínkám může dojít k poškození přístroje nebo nepřesných výsledku testu.

Upozornění: Environmentální faktory jako je dým z cigaret, různé pachy, zbytky plynu atd. můžou mít za následek vysokou úroveň koncentrace alkoholu v krvi (BAC), a nepřesnost výsledku vykonaného testu. V takových případech výrobce ani distributor nenese odpovědnost za používání testeru v nevhodných podmínkách.

Technická specifikace

Displej: digitální

Rozměry: 120x60x25mm

Váha: 80g bez baterii

Typ senzoru: polovodičový

Metoda měření: test vzduchu w ‰ (g/l)

Rozsah měření: 0.00‰ do 4.00 (tzn. 0.0 do 2.00mg/l nebo 0.00 do 0.400 BAC)

Důkladnost: +/- 0.005% BAC při 0.100% BAC

Čas nutný k přípravě k práci: 20-30sekund

Čas nutný k naměření výsledku: 10sekund

Čas výdechu během měření: kolem 5sekund

Napájení

Alkalická baterie 9V (součástí)

Životnost baterie: 300 měření (záleží na baterii)

Dodatečná možnost napájení: napáječ 12V je dodatečným volitelným příslušenstvím


Kalibrace: co 6 měsíců

Upozornění: Jelikož úroveň obsahu alkoholu a stupeň intoxikace je odlišná u různých lidí, producent ani distributor tohoto produktu nenese odpovědnost za žádné nehody, ničení, ani škody které vyřikají z používání tohoto výrobku.

Schéma testeru:



Displej

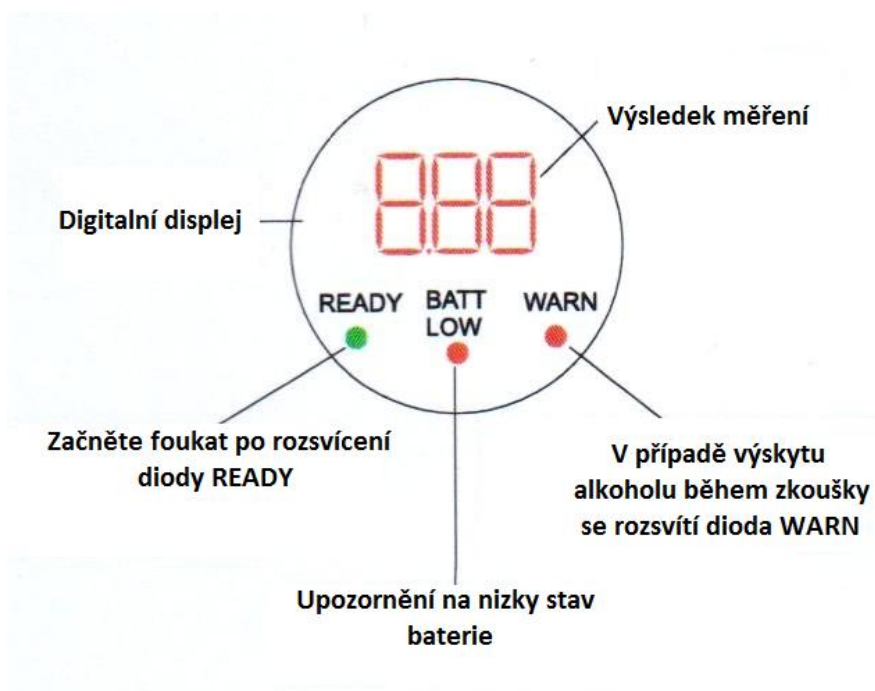

Upozornění: tester vydá výstražný zvuk v případě výskytu alkoholu během zkoušky.

1. Přípravení testeru k práci

Otevřeme kryt baterie a vložíme dovnitř 9V alkalickou baterii. Poté kryt baterie znovu uzavřeme, a umístíme náustek na k tomu určené místo.

2. Měření

Stiskneme tlačítko **POWER** nacházející se vepředu testeru (pod displejem na pravé straně). Tester se začne připravovat k práci. Zvukový signál nebo zelná dioda READY informuje, že je tester připraven. Během měření pomalu a přiměřeně foukáme do náustku po dobu asi 5 sekund. Nepřerušujte foukání, až do doby kdy uslyšíte dvojitý zvukový signál.

Upozornění: Dejte si pozor, aby se během foukání do zařízení nedostaly sliny, jelikož by mohly poškodit tester.

Během testu **nablokujte výstup vzduchu** na opačné straně náustku, jelikož by mohlo dojít k poškození testeru.

Po delší době nepoužívání testeru je možné, že první 2-3 měření, tester vykazuje nepřesné výsledky.

Po správně provedeném měření se na displeji zobrazí výsledek v promilích (‰). Pokud chceme provést další měření, je nutné začít postup znova od začátku.

Možné hlášení na displeji a jejich význam



Po zapnutí testeru se tester začne připravovat k práci. Na displeji se zobrazí odpočítávání od 200 do 0.



Tester připraven pro měření.



V případě výskytu alkoholu během zkoušky, na displeji se zobrazí obsah alkoholu v promilích a začne blikat dioda „WARN“.



Tester signalizuje vybité baterie pomocí diody „BATT LOW“, baterie je nutné vyměnit.



Jestliže byla překročena hranice 4,00 promili během měření, na displeji se zobrazí nápis „HOT“.

Upozornění!!!

Přečtěte si tato upozornění před tím, než poškodíte svůj tester.

1. Neprovádějte měření bezprostředně po požití alkoholu – je nutné počkat alespoň 20min.
2. Neprovádějte měření bezprostředně po kouření tabáku – je nutné počkat alespoň 20min.
3. Před použitím testeru by se neměly konzumovat žádné produkty obsahující alkohol (np. sladkosti) nebo vyplachovat ústa preparáty na bázi alkoholu
4. Před měřením je nutné ujistit se, jestli se ve vzduchu nenachází alkohol, nebo výpary čistících či desinfekčních prostředků.
5. Chraňte senzor testeru před vlhkostí/kapalinami.
6. Chraňte zařízení před nízkými a vysokými teplotami – např. nepřechevávávejte zařízení v autě.
7. Držte přístroj mimo antény mobilních telefonu nebo jejich vysilačů.
8. Zařízení přechovávejte v místech nedostupných pro děti.
9. V případě podezření že zařízení nefunguje správně – zašlete tester pro kalibraci.
10. Vyjměte z testeru baterie, pokud jej nebudete používat delší dobu.
11. Po delší době nepoužívání testeru je možné, že první 2-3 měření, tester vykazuje nepřesné výsledky.
12. Zařízení přechovávejte v místech, kde není vystaveno produktům/materiálům obsahujícím alkohol.
13. V zařízení je možné používat POUZE ALKALICKÉ BATERIE.

Praktické info

1. Obsah alkoholu v krvi je bezprostředně spojen s obsahem alkoholu v dechu. Vypity alkohol se šíří v krvi asi po dobu kolem 20-30minut, proto je doporučeno provést měření po uplynutí tohoto času.
2. Po dobu kolem 20min od ostatního kontaktu s alkoholem se vyhněte měření, protože se v ústech vyskytuje vysoká koncentrace alkoholu a má značný vliv na výsledek testu.
3. Je nutné vyhnout se vykonávání měření v otevřených prostorech během silného větru nebo v zakouřených místnostech.

Upozornění

Měření tímto testerem nemůže být základem pro iniciaci jakéhokoliv trestního řízení.

Použité zařízení

Elektrické zařízení označené symbolem koše nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Taková zařízení by měly být shromažďovány a recyklovány.



Tento návod je vlastnictvím společnosti SAPRO s.r.o. Konská 455, Třinec 739 61, Czech Republic

Stažením a/nebo používáním se nestáváte vlastníkem Návodu. Společnost SAPRO s.r.o. si ponechává vlastnictví Návodu a všech jeho kopií i veškerých souvisejících práv na duševní vlastnictví a vyhrazuje si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena.

Návody jsou určeny pro zákazníky, kteří si zakoupili naše výrobky. Nemusíme proto být schopni reagovat na požadavky jednotlivců, kteří si nezakoupili naše výrobky. Mějte na paměti, že návod a kontaktní informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění. Návod je chráněn zákonem o autorském právu a mezinárodními zákony a dohodami o autorských právech. Na každé kopii musíte uvést poznámku o autorském právu společnosti SAPRO s.r.o. a jakékoli další vysvětlivky týkající se vlastnictví, které byly na originále. Pro podrobnější info o produktu a detailnější bezpečnostní informace se řiďte originálním Anglickým návodem.

JE ZAKÁZÁNO MĚNIT NEBO ODSTRÁNIT JAKÁKOLI UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA NEBO MĚNIT ČI ODSTRANIT JAKÝKOLI OBSAH NÁVODU.

Výměna baterií

Pro výměnu baterie je nutné otevřít klapku ze zadu testeru. Vyjmout vybitou baterii a vložit novou 9V baterii. Do zařízení používejte pouze JEN ALKALICKÉ BATERIE. Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Podmínky záruky

1. Záruka se uděluje na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. K povinnostem majitele testeru patří:
 - a, Používání shodné s instrukcí obsluhy.
 - b, Co 6 měsíců provést placenou kalibraci, jinak hrozí ztráta záruky.
 - c, Přechovávat tester na správném místě.
3. Záruka se nevztahuje na:
 - a, Mechanické poškození nebo vady, které mechanické poškození způsobilo.
 - b, poškození a vady, které vznikly z důvodu nesprávného používání zařízení neshodného s instrukcí obsluhy, předělávání nebo konstrukčních změn.
 - c, Poškození způsobené přímým působením cigaretového kouře nebo alkoholu na senzor testeru.
 - d, Poškození nebo vady, které povstaly z důvodu nesplnění povinnosti majitele testeru.

Záruční karta bez data prodeje a razítka je neplatná. (Záruční karta se nachází v originálním polském návodu)

Proces zaslání testeru na kalibraci/servis.

1. Tester je nutné bezpečně zabalit (bez příslušenství a baterie). V případě špatného zabalení a poškození během transportu – riziko poškození nese majitel testeru a nevztahuje se na něj záruka.
Je nutné dodat:
 - Reklamační kartu s popisem závady (Reklamační karta se nachází v orig. polském návodu)
 - Kontaktní údaje (tel. Číslo)
 - Kopii prodejního dokladu
2. Jestliže není k produktu přiložena reklamační karta – je nutné doložit prodejní doklad na kterém je uvedena platnost záruky.
3. V případě že chybí reklamační karta a také prodejní doklad – tester bude opraven za poplatek jako pozáruční oprava.
4. Tester zašlete na adresu dodavatele (dodavatel následně pošle tester na adresu výrobce do zahraničí, kde proběhne servis)
Reklamační oddělení
SAPRO s.r.o.
Konska 455
Třinec 739 61
5. Proces může trvat delší dobu, jelikož se tester posílá přes dodavatele na servis do zahraničí.
6. Dobírkové zásilky nebudou přijaté.